

## **ES INSTRUCCIONES:**

### **Para todo tipo de quemaduras**

Abra el empaque y saque el apósito, colóquelo en el área de la quemadura y asegúrelo ligeramente. Efecto óptimo entre 0,5-3h. Contacte a un médico.

**Advertencia:** Cubrir una superficie extensa del cuerpo puede causar hipotermia. Reutilización puede causar infección. No utilice si el envase está dañado o si el vendaje seco parece.

**Quemadura química:** La herida debe ser irrigada y neutralizada a fondo antes de usar el gel.