

# BEHANDELING VAN NECROTISERENDE GEÏNFECTEERDE WOND NA LASERBEHANDELING MET PRINCIPELLE MATRIX EN PELSAN.

t=0



20-4: Laserbehandeling verwijderen tatoeage. Rode, gezwollen huidranden. Geen mechanisch debridement mogelijk.

Doel behandeling: Vervloeien van necrose in combinatie met reiniging van de kritisch gekoloniseerde ulcera.



Honingverband afgedekt met semi-occlusieve hydrogel.

De kritisch gekoloniseerde ulcera stabiliseren en vervloeide necrose wordt opgenomen in het absorberend secundair verband.



3-5. Goede drainage bereikt. Zwelling, roodheid en pijn verminderd. Het eerste granulatieweefsel is zichtbaar.

Doel van de behandeling: laatste resten necrose verwijderen, bacteriële lading verder reduceren, granulatieweefsel stimuleren en beschermen.

Verband-wissel: 2x per week.

t=25 dagen




15-5. Volledige epithelialisatie bereikt.

Geen wondbehandelingsproducten meer toegepast. Aanvullende huidverzorging met een hydraterende huidcrème.

## Gebruikt product:

Principelle Matrix (PPM1010)  
Steriel geïmpregneerd wondverband

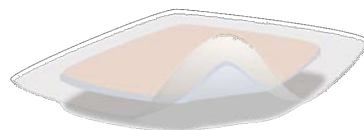

## Gebruikt product:

Principelle Pelsan (PPP150)

