



Formulación
Gel

Hyperoil®

Dispositivo médico. clase IIb
Para uso cutáneo solamente.



Uso previsto

El producto está indicado para aquellas lesiones o alteraciones cutáneas superficiales o profundas de varios tipos, que normalmente se resuelven por segunda intención.

El efecto barrera del dispositivo ayuda a la regeneración y reparación del tejido cutáneo en lesiones agudas y crónicas, reduce la formación del queloide y mantiene inalterado el crecimiento bacteriano. Además, el efecto barrera ayuda a mantener una hidratación adecuada de los tejidos en el área de la lesión al reducir la formación de escaras.

Tipo de operador

Para lesiones simples: siga las instrucciones dadas en este prospecto.

Para lesiones complejas (que requieren supervisión médica): el dispositivo puede ser utilizado tanto en servicios de salud como en el hogar bajo supervisión médica, por personal de salud o incluso por miembros de la familia o cuidadores, adecuadamente capacitados para el uso del producto.

Modo de aplicación

TUBO GEL 30ml

Tratamiento de lesiones simples: *herpes labial, acné infectado, eczema, urticaria, micosis, excoriaciones, picazón íntima, hemorroides, fistulas, fisuras, ojo de perdiz, onicomicosis, tiloma, verrugas, uñas encarnadas, pie de atleta, quemaduras, heridas traumáticas.*

Limpie, si necesario, la herida con agua o solución fisiológica, aplique una pequeña cantidad de Hyperoil® y masajee hasta su completa absorción. Cubra, si es necesario, la herida con una tirita transpirante o con una gasa estéril en TNT, de manera que los factores externos no provoquen infecciones. Repita la medicación diariamente hasta la completa curación. En caso de micosis y onicomicosis: aplique Hyperoil® durante por lo menos 15 días después de la completa regeneración.

GEL SPRAY 100ml - GASAS medicadas monouso 10 unidades (envueltas individualmente) 10cm x 10cm

Tratamiento de lesiones complejas: *heridas traumáticas y posquirúrgicas, quemaduras, úlceras, úlceras por presión, radiodermatitis, lesiones vasculares también diabéticas, lesiones con exposición de la dermis y/o tejido óseo, gestión de trasplantes de piel.*

ADVERTENCIA: las lesiones complejas siempre requieren la supervisión de un médico o personal médico autorizado. Para más información sobre el uso de Hyperoil® en estos casos, consulte la página web www.hyperoil.com

IMPORTANTE: las gasas medicadas deben cambiarse en cada medicación.

Límites de uso

El dispositivo es ineficaz en el tejido necrótico si la hipoxia tisular es menor de 30 mmHg de O₂.

Contraindicaciones

En el área tratada, no use ungüentos o desinfectantes de ningún tipo al mismo tiempo que usa el producto.

El uso incorrecto de las formulaciones puede retrasar o no regenerar y reparar los tejidos, evitando el proceso de cicatrización fisiológica.

En caso de hipersensibilidad a los principios activos o a cualquiera de los excipientes, es necesario interrumpir el tratamiento e instituir una terapia adecuada.

La aplicación del dispositivo, en cualquier formulación, puede dar lugar a una sensación temporal de ardor, picazón o enrojecimiento alrededor del área lesionada, en beneficio de una revascularización progresiva de la lesión.

www.rimos.com - info@rimos.com



Advertencia: consulte las instrucciones de uso

CE 0051



Evite su liberación al medio ambiente



Formulación
Gel

Hyperoil®

Dispositivo médico. clase IIb
Para uso cutáneo solamente.



Advertencias

- Permite en muchos casos no realizar terapia local con antibióticos y/o acortar la terapia sistémica con antibióticos.
- Evite usar desinfectantes porque afectan negativamente el proceso de regeneración y reparación del tejido tisular.
- Producto sensible al aire y a la luz. Expóngalo al aire solo el tiempo necesario, cerrando bien el contenedor después de su uso.
- Conserve a temperatura ambiente (20°/ 25 °C).
- El producto es compuesto de sustancias naturales de origen vegetal; no es peligroso para la salud y el medio ambiente. Podrían ocurrir alergias incluso si nunca se han detectado antes.
- No ingiera.
- Después del uso, deseche de acuerdo con las normas las gasas Hyperoil® y los contenedores.
- No utilice la misma gasa Hyperoil® en otros pacientes.
- El dispositivo no ha sido probado clínicamente en quemaduras de 2° y 3° grado.
- Mantenga fuera del alcance de los niños menores de tres años.
- Dada la presencia de aceite de Neem, no se recomienda el uso del producto en caso de deseo de embarazo.
- No utilice si el envase está abierto o dañado.

NO CONTIENE PARABENOS Y PETROLATOS

INCI formulación gel SPRAY 100 ml



Componentes: aceite de semilla de Melia Azadirachta; extracto de flor de Hypericum Perforatum.
Eccipienti: Aqua [Water]; Propylene Glycol; Ciclodextrin; Phenoxyethanol; Carbomer; Triethanolamine; Benzoic Acid; Dehydroacetic Acid; Sodium Dehydroacetate; Ethylhexylglycerin; Aroma.

INCI formulación TUBO GEL 30ml



Componentes: aceite de semilla de Melia Azadirachta; extracto de flor de Hypericum Perforatum.
Eccipienti: Aqua [Water]; Propylene Glycol; Ciclodextrin; Carbomer; Triethanolamine; Phenoxyethanol; Benzoic Acid; Dehydroacetic Acid; Sodium Dehydroacetate; Ethylhexylglycerin; Aroma.

INCI formulación gel GASAS MEDICADAS



Componentes: aceite de semilla de Melia Azadirachta; extracto de flor de Hypericum Perforatum.
Eccipienti: Aqua [Water]; Propylene Glycol; Triethanolamine; Carbomer; Phenoxyethanol; Benzoic Acid; Dehydroacetic Acid; Ethylhexylglycerin; Aroma.

Rev. 12 - mayo de 2019

La fecha de caducidad que se muestra en el envase se refiere al producto en un embalaje intacto, correctamente conservado.

LOT NÚMERO DE LOTE	REF CÓDIGO DEL PRODUCTO	LEA ATENTAMENTE LAS ADVERTENCIAS	MATERIAL RECICLADO Y/O REUTILIZABLE	DESPUÉS DEL USO NO LIBERAR AL MEDIO AMBIENTE
FECHA HASTA LA CUAL EL DISPOSITIVO SE PUEDE UTILIZAR	LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE USO	CANTIDAD ESTIMADA	FABRICANTE	DESPUÉS DE ABRIR, NO USE MÁS ALLÁ DE LOS MESES INDICADOS

COD. ISTOILG-SP

www.rimos.com - info@rimos.com



Advertencia: consulte las instrucciones de uso

CE 0051



Evite su liberación al medio ambiente