

# Ichthopaste

Vendaje de pasta de óxido de zinc e ictamol para úlceras en las piernas y afecciones de la piel



CE Producto sanitario Clase III



Tratamiento de heridas

Favorece la cicatrización de heridas crónicas y alivia los síntomas de daño cutáneo en todas las edades.

**Contiene un 6.32% Óxido de Zinc con 2% Ictamol.**

## ● Características:

- **Proporciona una capa de aceite a la piel** para evitar la evaporación de la humedad y ayudar a eliminar las placas de piel seca.
- **Antimicrobiano** – favorece la cicatrización.
- **Astringente** – ayuda a secar áreas húmedas del tejido.
- **Antimicótico** – contribuye al manejo de infecciones fúngicas.
- **Antipruriginoso** – ayuda a aliviar la picazón y a romper el ciclo de picazón-rascado.

## ● Indicaciones:

Ichthopaste ha demostrado eficacia en el tratamiento de úlceras venosas, pero su uso se extiende a múltiples aplicaciones médicas.

### Ichthopaste trata y gestiona:

- El eccema y la dermatitis
- El síndrome de la pierna roja
- Las afecciones climatológicas crónicas con óxido de zinc
- Las infecciones fúngicas
- La hiperqueratinosis con óxido de zinc e ictamol.

## EVOLAN.

Evolan es una empresa farmacéutica sueca.

Para garantizar la alta calidad colaboramos con diversos productores y proveedores de servicios de reconocido prestigio.



## ● Descripción general:

El vendaje **Ichthopaste**, con un 6.32% de óxido de zinc y 2% de ictamol, se utiliza como tratamiento tópico para favorecer la cicatrización de úlceras venosas en las piernas y sus afecciones cutáneas asociadas, como el eccema varicoso y la hiperqueratosis. El ictamol es un ingrediente de base oleosa que ayuda a tratar afecciones cutáneas crónicas liquenificadas.

**Ichthopaste** proporciona un ambiente húmedo para la cicatrización de heridas y tiene propiedades antipruriginosas y antimicóticas, lo que ayuda a reducir la irritación de la piel, romper el ciclo de picazón-rascado y promover la curación.

El vendaje **Ichthopaste** no contiene fibras elásticas y no se estira, por lo que debe aplicarse según las indicaciones. Se usa como una capa de contacto primaria sobre la herida o afección cutánea y debe cubrirse con un vendaje de retención, un sistema de terapia de compresión o una prenda de compresión.

Disponible en paquetes individuales o en una caja de 12 vendajes Ichthopaste de 7.5 cm x 6 m.




## ● Instrucciones de uso:

» La hinchazón puede presentarse durante la fase inflamatoria del proceso de curación; por ello, los vendajes de pasta deben colocarse de forma que permitan dicha hinchazón, evitando así que se ajusten demasiado.

» Pliegue. Dale una vuelta al vendaje alrededor del pie. En el dorso del pie, dobla el vendaje sobre sí mismo para crear un pliegue suelto. Completa una segunda vuelta alrededor del pie, creando otro pliegue.

» Continúa vendando de manera suelta sobre el tobillo y el talón, y sube por la pierna inferior, creando un pliegue en cada vuelta, ligeramente fuera del centro, para que no se ejerza presión sobre la cresta tibial. Corta el exceso de vendaje.

» Alisa el vendaje de pasta y cúbrelo con un vendaje de retención o un sistema de terapia de compresión, según tu propia evaluación y plan de tratamiento. Al retirarlo, desenrolla el vendaje de pasta en lugar de cortarlo.\*

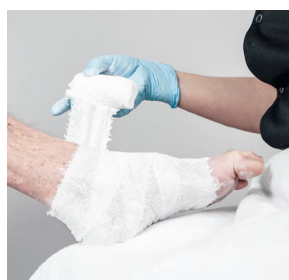

\* **Corte.** Como alternativa, simplemente corta el vendaje en tiras antes de colocarlo sobre las áreas afectadas a tratar. Al finalizar, cúbrelo con un vendaje de retención o un sistema de terapia de compresión.

Disponemos de vídeos en nuestra web para visionar las instrucciones de uso de Ichthopaste:

<https://www.voromed.net/heridas/video-viscopaste>