

INJECTION PAD

Apósito hemostático de compresión moderada para pieles sensibles



Apósito adhesivo con una almohadilla de 3mm de espesor altamente absorbente, provisto de un adhesivo acrílico de grado médico de alta adhesión.

Su diseño en forma circular evita su fácil desprendimiento.

Disponible en dos medidas diferentes:

INJECTION PAD Num. Producto	Tamaño		Por caja
	Área adhesiva	Área almohadilla	
No. 30	30mm Ø	10mm Ø	120 unidades
No. 36	36mm Ø	16mm Ø	100 unidades



Injection Pad de Nichiban está fabricado en Japón y tiene el certificado CE. Los apósitos se suministran dentro de envases individuales esterilizados, en caja de cartón.

Indicado especialmente para pieles sensibles gracias al adhesivo de bajo nivel de irritación, adecuado también para aplicaciones recurrentes.

Diseño de fácil aplicación pudiéndose utilizar con una sola mano.



● CARACTERÍSTICAS

Apósito esterilizado que se puede aplicar de forma higiénica sin tocar las zonas en contacto con la piel

» Aplicación

Efecto de compresión apropiado

El tejido de celulosa de la almohadilla ofrece una excelente absorción, y los 3mm de espesor de la misma brindan un efecto de compresión adecuado.

» Packaging

Apertura totalmente higiénica

Envase de apertura higiénica que facilita la aplicación del apósito sin tocar la almohadilla ni la zona adhesiva en contacto con el paciente.

Previene infecciones.

Apósitos esterilizados que se aplican empleando una única mano.

Su forma de empleo contribuye a una reducción del tiempo de aplicación.

(Esterilización con gas de óxido de etileno)

» Seguridad

Borde con adhesivo para pieles sensibles y de alta adhesión

Adhesivo hipoalergénico de gran reputación por su excelente adhesión y cuidado de la piel.

Su forma circular ayuda a asegurar que el apósito no se despegue.



● APLICACIÓN

- » Protección indicada tras analíticas, vacunación, proceso de diálisis, infiltraciones y donaciones de sangre.
- » Protección indicada tras intervenciones artroscópicas.

● ÁMBITO DE USO



1 » Abra el envase únicamente por la zona indicada hasta retirar completamente la protección superior.



2 » Agarrando por la zona protegida del adhesivo, despegue completamente el apósito sin tocar la almohadilla ni adhesivo.



3 » Aplique en el lugar de la punción centrando la almohadilla en el centro de la misma.



4 » Retire el protector del adhesivo y acabe de asegurar el completo pegado del apósito sobre la piel.

» Precauciones de uso

Reutilización prohibida

- » Si aparecen síntomas de una infección en el sitio de aplicación, suspenda el uso y tome el tratamiento adecuado.
- » Si aparece un trastorno de la piel (erupción cutánea / enrojecimiento, ampollas, descamación de la piel, picazón, etc.) en el sitio de aplicación, suspenda el uso y tome el tratamiento adecuado
- » Si el apósito se moja o se ensucia, o tiene fugas de sangre o exudado, reemplácelo inmediatamente por uno nuevo.

- » No utilice el apósito si el embalaje está sucio, dañado o mojado.
- » Aplique el apósito inmediatamente después de la apertura del embalaje individual.
- » Retirar el apósito ya pegado lentamente siguiendo el sentido del vello corporal a fin de evitar daños en la piel.

» Precauciones para el almacenamiento

- » Almacene a temperatura ambiente, lejos del agua, altas temperaturas, alta humedad y luz solar directa.