

NICHIBAN CO.,LTD

2-3-3 SEKIGUCHI,BUNKYO-KU TOKYO 112-8663, JAPAN

TEL:+81(0)3-5978-5636 FAX:+81(0)3-5978-2890



Instruction for use of CATHEREEPLUS™ROLL

Instrucciones de Uso de CATHEREEPLUS™ROLL

【Descripción del producto】

- CATHEREEPLUS™ tipo ROLL. Puede cortarse a la longitud requerida para su uso.

【Resumen】

- Producto no estéril.

- 3 consideraciones adicionales para el cuidado:

Lograr que sea "suave para la piel" y tenga "buena adhesión" era difícil con adhesivos convencionales debido a sus propiedades contradictorias. CATHEREEPLUS™ ROLL utiliza un adhesivo de gel de uretano con una permeabilidad a la humedad muy alta, logrando tanto "suavidad para la piel" como "buena adhesión" a un nivel elevado.

Proponemos una "nueva fijación" que combina tres aspectos clave: "alta permeabilidad a la humedad", "alta adhesión" y "baja irritación de la piel".

【Características】

- **Alta permeabilidad a la humedad:** Mantiene la piel siempre seca.

El adhesivo de gel de uretano tiene una permeabilidad a la humedad aproximadamente 5 veces mayor que los adhesivos acrílicos comunes (según nuestra empresa). Esto mantiene la piel cómoda incluso después de un largo período de aplicación, ya que reduce la sensación de humedad causada por el sudor.


- **Fijación segura y confiable:**

El adhesivo de gel de uretano está uniformemente recubierto en toda la superficie de la película, lo que permite una adhesión firme incluso en superficies desiguales de la piel. La película es flexible y sigue los movimientos de la piel, proporcionando una fijación confiable incluso con aplicaciones prolongadas.


● **Baja irritación y suavidad para la piel:**

El adhesivo de gel de uretano apenas desprende o daña el estrato córneo al retirarse. La película se estira bien, reduciendo el estrés en la piel y minimizando erupciones o molestias al retirar.

- La película de liberación está "prelevantada", lo que facilita su manipulación incluso con guantes.
- Como es una película elástica, es fácil de aplicar y reduce el estrés en la piel.
- El producto evita la entrada de agua y bacterias desde el exterior.
- Su excelente deslizamiento reduce la fricción con la ropa y las sábanas

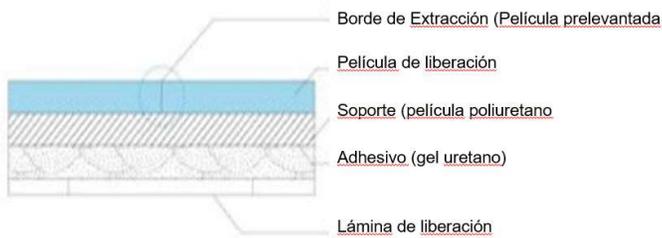

[Uso]

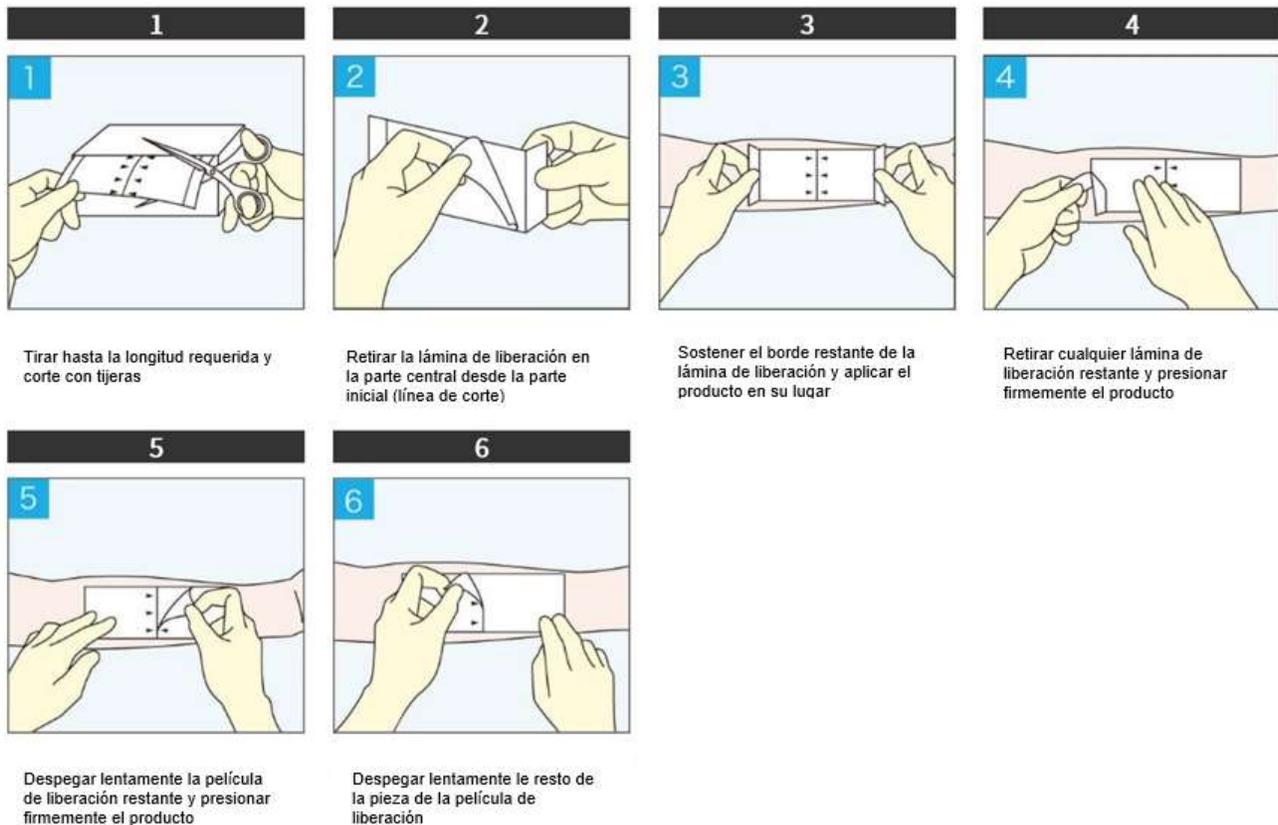

【Aplicaciones】

- Fijación de cubiertas para gasas y apósitos.
- Fijación de tubos y catéteres.
- Cubierta protectora para la piel.
- Refuerzo y protección de soportes para usuarios de estoma o CAPD durante la ducha.

【Precauciones de uso】

- No usar directamente sobre heridas o sitios de punción, ya que este producto no es estéril.
- No usar en áreas con infecciones, sangrado, exudado, trastornos cutáneos o metabolismo cutáneo anormal.
- Este producto no puede sustituir a las suturas de fijación.
- Limpiar y secar completamente la piel antes de la aplicación.
- No aplicar el producto extendido, ya que puede causar daño o desprendimiento de la piel.
- Suspender su uso si aparece un trastorno cutáneo u otra anomalía.
- Si se determina clínicamente que hay una infección, suspender su uso, iniciar un tratamiento adecuado y retomarlo después de que la infección haya sido tratada.
- Antes de ducharse o bañarse, asegurarse de que el producto esté completamente en contacto con la piel y el soporte.
- Para retirar, despegar lentamente siguiendo la dirección del flujo del vello para evitar daños en la piel

【Precauciones de almacenamiento】

- Método de almacenamiento: Guardar a temperatura ambiente, lejos de agua, altas temperaturas, alta humedad y luz solar directa.

【Especificaciones】

Numero de producto	Tamaño	Unidades/caja
CPSR0510	50mm x 10m	1 roll
CPSR1010	100mm x 10m	1 roll
CPSR1510	150mm x 10m	1 roll

Overseas Business Department (HQ)

Nichiban Co., Ltd.

November.2021

MDR_Version1

ESP: December.2024